


ADVANCE 6


GIDS VOOR DRAADLOZE ACCESSOIRES

CONTACT MAKEN MET JE OMGEVING

Door de bandbreedte die wordt geboden

Dankzij onze draadloze connectiviteit kunnen uw cliënten bedienen, personaliseren en geluid streamen naar hun Advance 65 & Advance 64 hoortoestellen zonder een tussenapparaat te hoeven dragen.

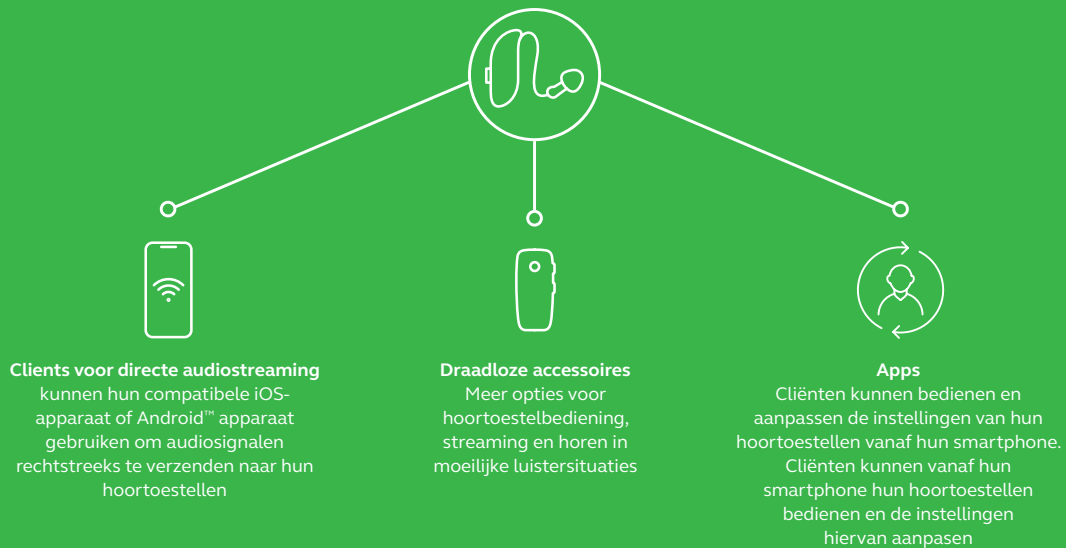

Accessoire	Beschrijving	Specificaties	Koppelingsproces	Handige tips
 Multi-Mic+	<p>Een externe microfoon, die het signaal aanzienlijk verbetert bij ruisverhouding in lawaaiige omgevingen.</p> <p>Met Bluetooth® LE Audio en Auracast-technologie; bereidt u zich voor op nieuwe ervaringen om te verbinden en bent u klaar om helder geluid te streamen via Auracast broadcast audio naar meerdere gebruikers.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 63,5 x 29,9 x 23,8 mm • Oplaadbare ingebouwde batterij • USB-C kabel • 3 uur maximale oplaadtijd • Draadloos bereik van 25 meter • Bedrijfstijd: Microfoonstand / FM-stand/ Ringleidingmodus: Tot 15 uur • Line-in modus: Tot 20 uur 	<p>Zet de Multi-Mic+ aan.</p> <p>Druk op de koppelingsknop op de Multi-Mic+ en plaats de hoortoestellen (ingeschakeld) binnen 5 cm van de microfoon. Het proces is dan hetzelfde als het proces voor TV-Streamer+.</p>	<p>Horizontaal op tafel laten liggen helpt om in groeps gesprekken beter te horen beter. Firmware-updates worden gedownload via de BeMore-app.</p> <p>AutoStreaming is beschikbaar op de Multi-Mic+. Indien geactiveerd (via de app of aanpassoftware) vangen de hoortoestellen automatisch het gestreamde geluid op zodra de Multi-Mic+ wordt ingeschakeld.</p>

Accessoire	Beschrijving	Specificaties	Koppelingsproces	Handige tips
 <p>Simple Remote Control</p>	<p>De eenvoudige afstandsbediening is klein en handig in een elegant ontwerp. Hij heeft het formaat van een autosleutel en past in elke broekzak of handtas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Afmetingen : eenvoudige afstandsbediening 73 x 35 x 14 mm Eenvoudige afstandsbediening voor volumeregeling en veranderen van programma Tactiele knoppen kunnen worden gevoeld zonder te kijken De hoortoestellen kunnen worden gedempt door de knop ingedrukt te houden Weegt slechts 22 g Bereik van 1 meter 	<p>Schakel de eenvoudige afstandsbediening in en druk op de koppelingsknop op de achterkant.</p> <p>Open en sluit de batterijlade van het hoortoestel (draai oplaadbare hulpmiddelen uit en weer aan) binnen 20 seconden.</p>	<p>De CR2032 knoopcel-batterij wordt veel gebruikt en kan eenvoudig worden vervangen. De batterij gaat zeer lang mee dankzij het zuinige stroomverbruik.</p>
 <p>TV Streamer 2</p>	<p>De TV Streamer 2 kan worden aangesloten op een groot aantal verschillende audio-bronnen en stuurt het signaal tot 7 meter in echte stereo en zonder waarneembare vertraging rechtstreeks naar de hoortoestellen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> TV Streamer 2 formaat: 91 x 83 x 47 mm 7 meter bereik Echte stereo Versterking en functies kunnen in een apart programma worden ingesteld/afgestemd 1 analoge en 2 digitale ingangen (3,5 mm jack, TOSLINK, coaxiale connector) 	<p>Druk op de koppelingsknop op de TV Streamer 2, open en sluit de batterijlade van het hoortoestel (zet oplaadbare apparaten uit en weer aan) - de apparaten zijn nu gekoppeld en blijven gekoppeld.</p> <p>Om een programma te activeren op de TV Streamer 2, druk je ongeveer 3 seconden op de programmakoezets of schakel je het programma in via de BeMore app.</p>	<p>Tot wel 3 TV Streamer 2-apparaten kunnen verbonden worden aan een set hoortoestellen (als de klant de TV Streamer 2 voor verschillende tv's wenst te gebruiken).</p> <p>1 TV Streamer 2 kan met oneindig veel hoortoestellen worden gekoppeld.</p>
 <p>TV-Streamer+</p>	<p>De TV-Streamer+ werkt met Bluetooth Low Energy Audio en verzendt kristalhelder stereogeluid met geen merkbare vertraging. Eenmaal aangesloten worden de audiosignalen automatisch doorgestuurd naar de hoorsystemen zodra de tv wordt aangezet.</p> <p>De BeMore app biedt tal van instelingsmogelijkheden en er kan ook een publieke of private Auracast stream worden gestart.</p>	<ul style="list-style-type: none"> TV-Streamer+ formaat: 62,3 x 49,5 x 15,7 mm 7 meter bereik Maakt gebruik van Bluetooth LE-audio en zendt uit in stereo Het volgende kan worden aangepast via de BeMore app: Latency, volume, Auracast stream en firmware updates 3,5 mm jack-ingang of optische mini-TOSLINK-adapter 	<p>Sluit de TV-Streamer+ aan op de voeding. Druk op de koppelingsknop en plaats de hoortoestellen binnen 5 cm van de TV-Streamer+. Het eerste hoortoestel wordt na 12 seconden gevonden en het tweede na nog eens 12 seconden. De zoekfunctie gaat door tot er geen ingeschakelde hoortoestellen meer binnen bereik zijn.</p> <p>Hoortoestellen verzenden audiosignalen automatisch via mix-in streaming. Koppel de TV-Streamer+ in de BeMore app onder het menu-item "Meer".</p>	<p>Eenmaal aangesloten kan de TV-Streamer+ worden bediend via de BeMore app.</p> <p>Bevestig de TV-Streamer+ aan de achterkant van de tv met de meegeleverde klittenbandstrip - zo verdwijnt hij volledig uit het zicht.</p> <p>AutoStreaming is beschikbaar voor de TV-Streamer+. Indien geactiveerd (via de app of aanpassoftware) pikken de hoortoestellen automatisch geluid op.</p>